


VITEK® 2 – CLEANING THE OPTIC



- 1. Optics cleaning menu로 이동합니다

경로: **Main Menu > Utilities > Maintenance > Cleaning > Optics Cleaning**


(VITEK® 2 XL의 경우 필요 시 Section A 또는 B 선택)

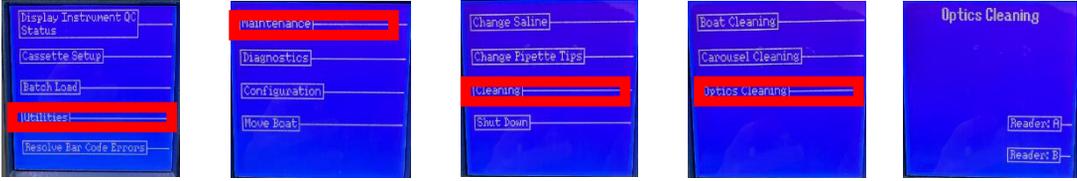


- 2. Card가 들어있는 경우 “Cards are still processing. Do you wish to continue?” 메시지 확인 후 **YES**를 선택하여 “**Clean the optics**” 메시지가 표시되는지 확인합니다

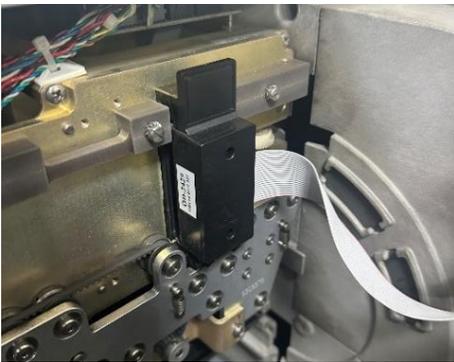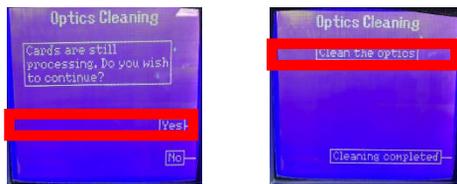

상단 Cover를 들어 올려
Optic이 보이도록 합니다

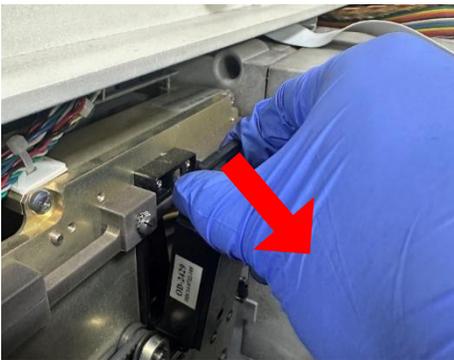

Optic의 상단을 부드럽게 잡고
아래방향으로 천천히 당겨 내립니다

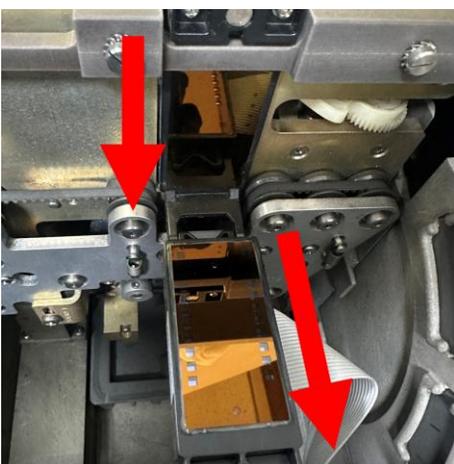

- 부드러운 천 (예. 안경닦이) 등으로 Optic 표면을 가볍게 닦아줍니다
- 얼룩이나 스크래치가 발생하지 않도록 반드시 **한 방향**으로만 진행합니다
- 지워지지 않는 얼룩이 있는 경우, 알코올 솜으로 가볍게 닦은 후 마른 천으로 마무리합니다
- Optic을 닫은 후 장비 메뉴 화면에서 “**Cleaning complete**” 선택하여 종료합니다